



DIAQUICK HIV 1&2 Ab Cassette – Sposób użycia

- 1** Otwórz opakowanie i sprawdź zawartość:
 - Kasetę testową
 - Reagent
 - Pipeta
 - Nakłuwacz
 - Ulotka informacyjna + Instrukcja wykonania testu
- 2** Przeczytaj uważnie ulotkę informacyjną oraz instrukcję wykonania testu (sposób użycia) DIAQUICK HIV 1&2 Cassette.
- 3** Sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli okres ważności się przedawnił, użyj innego testu.


Próbka poboru krwi (lancetą)

- 4**


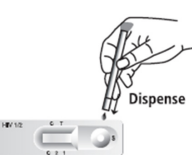
Przetrzyj miejsce nakłucia, wacikiem z alkoholem.

- 5**



Nakłuj to miejsce sterylnym lancetem.

- 6**


Naciśniętą pipetę umieść przy dużej kropli krwi, następnie puść pipetę aby pobrać krew.

- 7**


Zaaplikuj 20ul krwi do otworu testowego (s).

- 8**


Dodaj dokładnie 4 krople Reagentu (czyli całą zawartość buteleczki) do otworu testowego (s).

Interpretacja

Wynik testu odczytaj od 10 do 20 minut od momentu dodania Reagentu. Wynik negatywny powinien być odczytany do 20 min. Zbyt późny odczyt może dać błędny wynik.

Jak odczytać wyniki:


Negatywny



Pozytywny

Hiv 1 pozytywny

2 widoczne linie (C, 1)

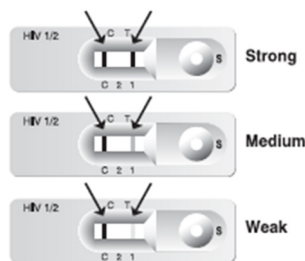


W przypadku widocznych 3 linii (C, 1, 2)



Jeśli linia "1" jest ciemniejsza od linii "2" to wyniki wynik jest pozytywny tylko dla HIV 1.

Hiv 2 pozytywny

2 widoczne linie (C, 2)

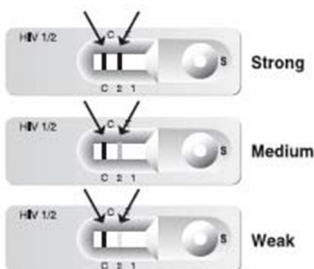

W przypadku widocznych 3 linii (C, 1, 2)



Jeśli linia "2" jest ciemniejsza od linii "1" to wynik jest pozytywny tylko dla HIV 2.

Uwaga (zarówno HIV 1 i HIV 2 Pozytywnie):

Jeżeli grubość pasma pomiędzy liniami 1 i 2 są zbliżone do siebie, wynik może być zarówno dodatni dla HIV- 1 i HIV -2. W tym przypadku , należy wykonać specjalistyczne badania.

Wynik błędny – brak linii „C”

